

Antibakteriální respirátor BreasaSAFE® ANTI-COVID-19/FFP2

filtrační polomaska bez výdechového ventilu




Návod k použití

Filtrační polomaska BreasaSAFE® ANTI-COVID-19/FFP2 je vhodná na ochranu dýchacích orgánů proti částicím. Záchyt minimálně 94 % pevných (průměrná velikost částic 0,6 µm) nebo kapalných (průměrná velikost částic 0,4 µm) částic v ovzduší. Filtrační polomaska BreasaSAFE® ANTI-COVID-19/FFP2 je určena k ochraně dýchacích orgánů uživatele proti viru SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc COVID-19.

Maximální dobu použitelnosti / životnosti respirátoru nelze přesně stanovit, závisí vždy na podmínkách, v jakých je respirátor používán. Respirátor se nesmí máčet ve vodě ani v jiné tekutině. Respirátor je při použití ve znečištěném (prašném či velmi prašném) prostředí určen k jednorázovému použití (označení NR). Respirátor se nečistí.

Návod k nasazení respirátoru

1. Důkladně si umyjte ruce.
2. Uchopte respirátor a přiložte ho k obličeji (respirátor má v horní části vybrání na nos a těsnicí pásku).
3. Přetáhněte upínací pásky přes hlavu.
4. Prověřte těsnost respirátoru: Silně se nadechněte. Jestliže zjistíte pronikání vzduchu mezi respirátorem a obličejem, zlepšení těsnosti dosáhnete:
 - posunutím respirátoru na obličeji do vhodnější polohy
 - posunutím upínacích pásek na hlavě do vhodnější polohy

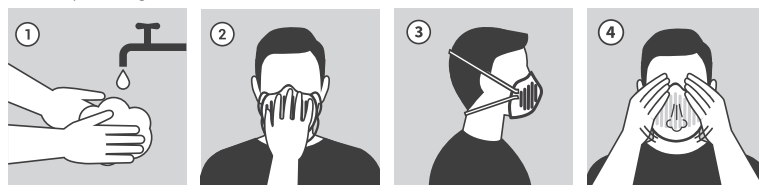

Před použitím čtěte návod k použití, proveďte, zda respirátor není poškozený a při nasazování respirátoru na obličej postupujte podle návodu.

Respirátor nepoužívejte, jestliže:

- škodlivé částice pronikly respirátorem a bylo zjištěno znečištění, zápach nebo jiný příznak průniku škodlivin respirátorem,
- došlo k podstatnému zvýšení dýchacího odporu respirátoru.

Respirátor nechrání proti plynům a ve vzduchu s nižším obsahem kyslíku než 17 %. Nesmí být také použit k ochraně v prostředích, kde není známo složení a koncentrace škodlivin v ovzduší.



Respirátor musí být uchován v suchém a čistém prostředí při teplotách -5 až +40°C.



Požadavky na těsnost pravděpodobně nebudou splněny, jestliže má uživatel na dosedací ploše těsnicí linie respirátoru vously.

Certifikováno Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i. (Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1, www.vubp.cz) dle Evropské normy EN 149:2001+A1 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky k ochraně proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení (Ochranná třída FFP2).




Vše o **BreasaSAFE®** produktech:
www.nano4fibers.com/cs/breasaife

EU Prohlášení o shodě (CE):

www.nano4fibers.com/cs/prohlaseni-o-shode-ce-ffp2

Výrobce: PARDAM NANO4FIBERS s.r.o.

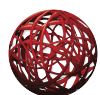

NANO4FIBERS
PARDAM

T: +420 565 552 610
E: breasaife@nano4fibers.com

www.nano4fibers.com

PARDAM
NANO4FIBERS s.r.o.
IČO: 25268694
DIČ: CZ25268694

Headquarters
Žižkova 2759
413 01 Roudnice n/L
Czech Republic