


ANTIMIKROBIÁLNÍ VÍCENÁSOBNĚ POUŽITELNÝ CENOVĚ DOSTUPNÝ FILTR DO ROUŠEK

BreaSAFE®
FILTER CLASSIC
10 × 15




NANOVLÁKENNÁ FILTRAČNÍ
VLOŽKA DO ROUŠEK S KAPSOU

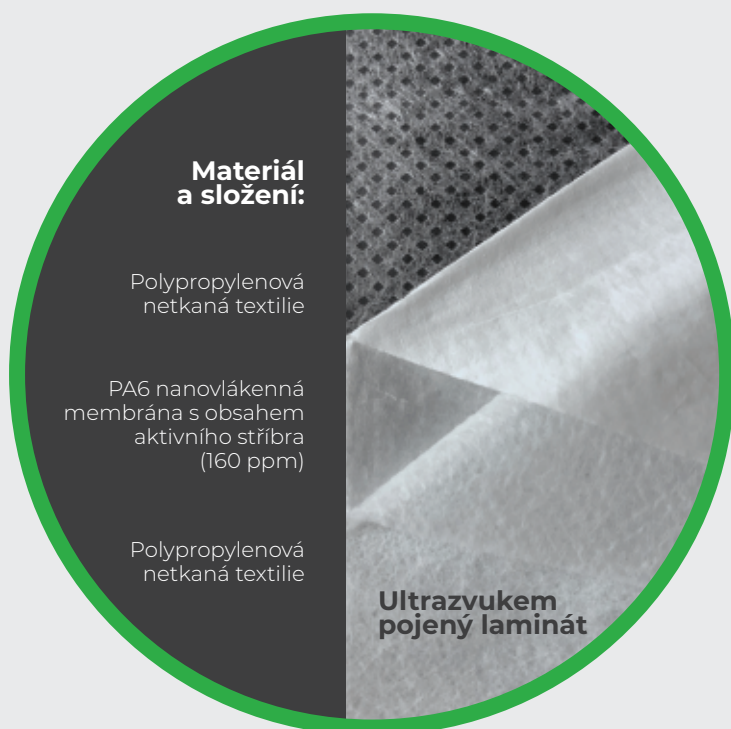

1 balení obsahuje 10 ks (10 × 15 cm)

*Další rozměry na přání zákazníka při VO odběrech

97% ÚČINNOST ZÁCHYTU

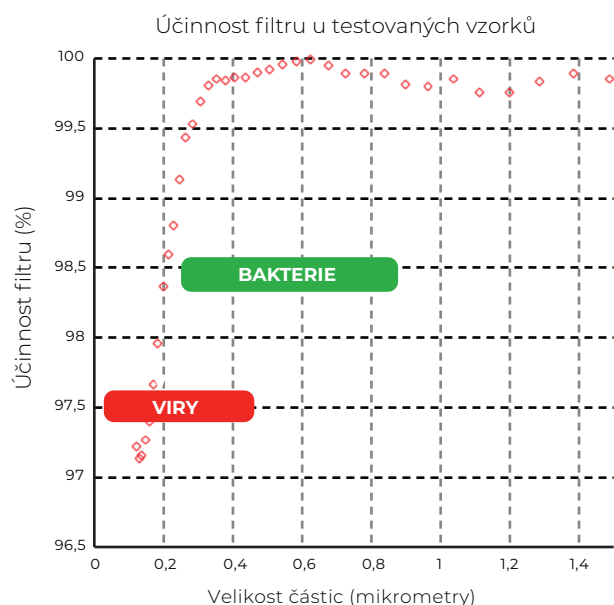

BreaSAFE® FILTER vytvoří z bavlněných roušek účinnou zbraň proti virům a bakteriím

Unikátní česká nanovláknenná membrána s obsahem aktivního stříbra účinně likviduje mikroorganismy a významně tak zvyšuje ochranný faktor běžně dostupných roušek s kapsou (ať již zakoupených nebo doma ušitých).

Supertenká vlákna a malé póry zajišťují vysokou účinnost při zachytávání částic, bakterií, virů a alergenů.

Návod k použití:

1. Důkladně si umyjte ruce
2. Vyjměte BreaSAFE® FILTER z obalu a vložte do kapsy v roušce
3. Roušku upevněte na obličej dle instrukcí od výrobce

Návod na údržbu:

BreaSAFE® FILTER je možné:

- ručně vyprat (v dezinfekci na bázi lihu nebo isopropylalkoholu)
- sterilizovat v autoklávu či troubě (max. 70°C)
- sterilizovat přezhlením (na minimální teplotu)

*S hrdostí vyvinuto a vyrobeno
v České republice.*

www.BreaSAFE.com | www.nano4fibers.com



NANO4FIBERS
FACTORY

JEDNODUCHÁ A EFEKTIVNÍ OCHRANA